



Nieuwe cliënt aannemen

Heeft u een nieuwe cliënt? Laat de cliënt een breinmeting uitvoeren op zijn of haar eigen telefoon. Na de meting ontvangt u van de cliënt een code, vul deze code hieronder in om het intake proces te starten.

Meetcodes
KnZd3RQteT

✓ Verifiëren

Brainmarker.com
NEUROFEEDBACK & NEURO-EDUCATION

Welkom bij BrainMarker

Hey Karen test,
Je bent door Els Smit uitgenodigd voor de BrainMarker app. Klik op de knop hieronder om de registratie af te ronden of vul de code **LiwJyvPw6** handmatig in.

OPEN DE APP

[Bezoek onze website](#)
Verstuurd door BrainMarker: Dinsdatter

Brainmarker.com
NEUROFEEDBACK & NEURO-EDUCATION

Nieuwe cliënt

← Terug naar overzicht

Profiel
Naam*
Geboortedatum
Notities

Contactgegevens
Adresregel 1*

Bevestig uitnodiging

Er wordt een email verzonden aan **janverheggen007@gmail.com** met instructies om de registratie af te ronden.

✓ DOORGAAN ✗ ANNULEREN

Info
Data
Geactiveerd
Intake
28 dec 2020
Geboortedatum
28 dec 2020
Heeft neurofeedback
Nooit

Nieuwe behandeling
Start een nieuwe behandeling gebaseerd op de training uitgevoerd op 28 dec. 2020
13:51
Start behandeling



Neurofeedback

Wat is de primaire klacht?

- Angststoornis
- Burn-out
- Concentratieproblemen
- Depressie
- Impulsief / hyper
- Stress
- Vastgestelde diagnose ADHD algemeen
- Vastgestelde diagnose ADHD onoplettend, "oude" ADD
- Vastgestelde diagnose ADHD type 2, overwegend impulsief
- Vastgestelde diagnose autisme ASS
- Versterker op zintuigen (HSP)

Wijzig selectie

Brainmarker.com
NEUROFEEDBACK & NEURO-EDUCATION

Organisatie
Gebruiker: Naam of je gegevens correct zijn ingevoerd.

Naam Björn Cruts

E-mail Nijmouter045@gmail.com

Video's

Brainmarker.com
NEUROFEEDBACK & NEURO-EDUCATION

Welkom Björn Cruts
Druk op training starten om direct te beginnen met neurofeedback. Tusschen met een contact op te nemen met je geselecteerde therapeut.

Video's importeren

Training starten

Voortgang
informatie

Primaire klacht
Onderstaande primaire klacht is vastgesteld voor deze training. Start een nieuwe training om andere klachten te behandelen.
Impulsief / hyper

Trainingsdoelen
De onderstaande doelen worden getraind in deze training. Start een nieuwe training om andere doelen te selecteren.

Frontaal links	Frontaal rechts
<input checked="" type="checkbox"/> Theta inhiberen	<input checked="" type="checkbox"/> Theta inhiberen
<input type="checkbox"/> Alpha inhiberen	<input type="checkbox"/> Alpha inhiberen
<input type="checkbox"/> Beta1 stimuleren	<input type="checkbox"/> Beta1 stimuleren
<input type="checkbox"/> Beta2 inhiberen	<input type="checkbox"/> Beta2 inhiberen

Trainingstraject
Aantal trainingen*
10
Duur training (minuten)*
30

Brainmarker.com
NEUROFEEDBACK & NEURO-EDUCATION

Video's importeren
Share een video naar de Brainmarker app. Het video bestand wordt automatisch geüpload naar de app. De video wordt automatisch geüpload naar de app.

1. Ljapangon Mountain Road Norway, Engles, Norsk ID

2. Beautiful Relaxing Music: Norway's Nature, Violin Music, Flute Music, Piano Music, Harp Music, ID

